



**Suturi studiate și concepute special
pentru medicina dentară**

Acele SKD: netezime impecabilă și înaltă penetrabilitate

Acele chirurgicale din gama GOLD LINE au o suprafață perfect lustruită („oglindă”) și sunt realizate sub control computerizat, care verifică și elimină automat acele cu vârf imperfect.

- GAMĂ DE PRODUSE REALIZATĂ DIN OȚEL AISI 302 ÎMBOGĂȚIT CU CROM-NICHEL
- EXCELENȚĂ REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE ȘI RUPERE
- CAPACITATE ÎNALTĂ DE PENETRARE A ȚESUTURILOR
- EXCELENT PROFIL DE SIGURANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ LA NIVELUL CONEXIUNII AC/FIR
- STABILITATE SUPERIOARĂ ÎN PORT-AC DATORITĂ CORPULUI CU CANAL LASER




Pentru confecționarea acelor chirurgicale din gama GOLD LINE a fost ales un aliaj de excepție, oțelul inoxidabil AISI 302 SERIES.

Tehnologia avansată cu care sunt fabricate acele din oțel inoxidabil AISI 302 SERIES a permis ca această linie să fie utilizată de ani de zile în domeniile chirurgiei plastice, vasculare și cardiace.

Toate firele de sutură chirurgicală GOLD LINE sunt montate la ac cu atașament perforat prin tehnologie laser, iar acele folosite prezintă cel mai înalt nivel de rezistență, ductilitate și înaltă capacitate de penetrare.

Din aceste motive, GOLD LINE garantează performanțe maxime în tratamentul plăgilor chirurgicale și lambourilor extinse cu un grad înalt de fermitate. Datorită acelor atraumatice, seria GOLD LINE are aplicații în microchirurgie și chirurgia parodontală.

Gama de produse SKD® GOLD LINE este un instrument valoros pentru cei mai exigenți profesioniști din domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.

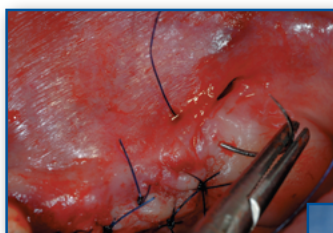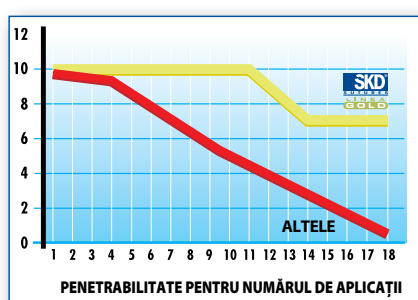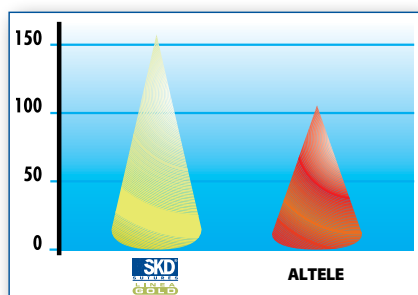


CAZ CLINIC
Dr. Valeria Chierichetti



Suturi studiate și concepute special pentru medicina dentară

Vârfuri de ac:

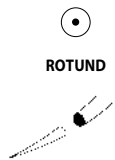

ROTUND



Vârf și corp circular
aplatizat în mijloc
Pentru țesuturi moi
și ușor penetrabile

LAMBOURI CU GROSIME PARȚIALĂ




TRIUNGHIULAR REVERS



Secțiune triunghiulară,
atât în vârf, cât și la corp
Pentru țesuturi cu consistență crescută,
difícil de penetrat

LAMBOURI DE GROSIME TOTALĂ

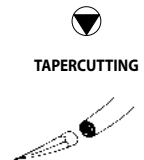

TAPERCUTTING



Vârf triunghiular și corp cilindric
Pentru țesuturi rezistente sau ne-rezistente,
inclusiv în parodontologie și pentru
lambouri mucogingivale


LAMBOURI DE GROSIME PARȚIALĂ ȘI TOTALĂ

Tipuri de ace:

Ace cu canal laser [SKD]



Ace cu canal standard

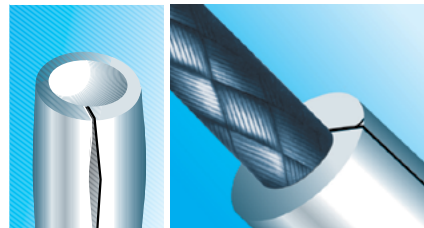

Lungimea ideală pentru domeniul stomatologic:

45 cm = fir scurt

70 cm = fir lung

60 cm = fir





SILK

Sutură chirurgicală sterilă neresorbabilă multifilament din mătase, acoperită cu silicon. Culoare neagră.



CE
0546

Sutura chirurgicală din fire de mătase împletite SKD® SILK este supusă unui tratament special pentru a o face compactă și netedă.

Sutura SKD® SILK este permanent supusă controlului de calitate pentru a asigura lipsa capilarității și un diametru perfect uniform.

Oferă o excelentă rezistență la tracțiune și capacitate de menținere a nodurilor, îndeplinind toate standardele internaționale.

Acest produs de sutură, tradițional și ultra-experimentat, are proprietăți excelente de manevrabilitate și ușurință în realizarea nodurilor. Este tratat cu silicon.


Cutie cu 12 fire de sutură cu ac, ambalate individual.

ROTUND	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	U.S.P.
			0,7	1	1,5	2	3	
1/2 CERC 20 mm	60 cm	negru				KSG862		
1/2 CERC 17,4 mm	60 cm	negru				KSG872		

TRIUNghiULAR REVERS	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	U.S.P.
			0,7	1	1,5	2	3	
1/2 CERC 22,9 mm	60 cm	negru					KSG643	
3/8 CERC 18,7 mm	60 cm	negru			KSG683	KSG684		

TAPERCUTTING	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	U.S.P.
			0,7	1	1,5	2	3	
1/2 CERC 17,4 mm	60 cm	negru			KSG951	KSG952		

Tehnica de nod recomandată

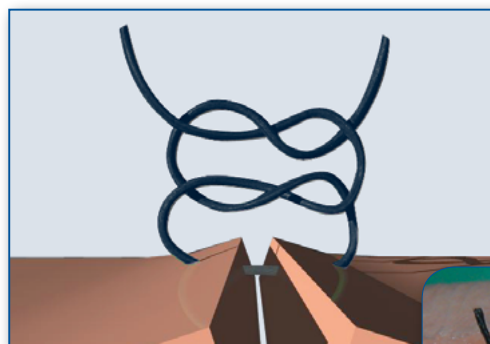

Nodul recomandat: PĂTRAT

Nodul pătrat este realizat din două jumătăți similare de nod, situate pe același nivel.

Se efectuează în modul următor: mai întâi o trecere în sensul acelor de ceasornic, apoi o trecere în sens invers acelor de ceasornic.


Tensiunea aplicată la capetele nodului mărește puterea de strângere a acestuia.

Lungimea recomandată a capetelor

Lungimea capetelor (2-3 mm) este proporțională cu coeficientul de frecare și cu flexibilitatea SKD® SILK.



Suturi studiate și concepute special pentru medicina dentară

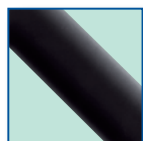

MONO

Sutură chirurgicală sterilă neresorbabilă, monofilament, nylon poliamidă. Culoare neagră.

SKD® MONO este o sutură sintetică monofilament de nylon, ale cărei caracteristici principale sunt rezistența, excelenta forță tensilă la nivelul nodului și reacția minimă la nivelul țesutului.

Firul de sutură este neted și ușor de manevrat, iar diametrul său este foarte uniform, ceea ce îl face ideal pentru aplicații în chirurgia orală.

Cutie cu 12 fire de sutură cu ac, ambalate individual.




CE
0546

ROTUND	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	U.S.P.
			0,5	0,7	1	1,5	2	E.P.
1/2 CERC 17,4 mm	60 cm	negru				KMG214		

TRIUNGHIULAR REVERS	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	U.S.P.
			0,5	0,7	1	1,5	2	E.P.
3/8 CERC 16,2 mm	60 cm	negru			KMG650			
3/8 CERC 18,7 mm	60 cm	negru				KMG662		

TAPERCUTTING	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	U.S.P.
			0,5	0,7	1	1,5	2	E.P.
1/2 CERC 17,4 mm	60 cm	negru			KMG990			

Tehnica de nod recomandată

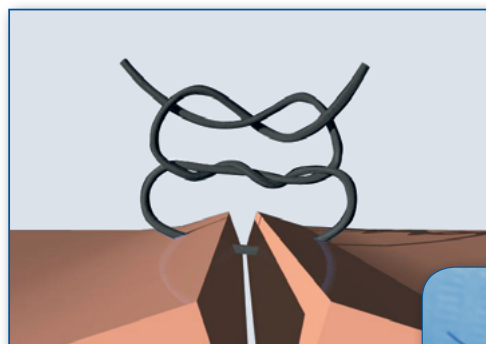


Nodul recomandat:
NODUL CHIRURGICAL COMPLET

Se efectuează în modul următor: o trecere inițială cu dublă înfășurare urmată de o trecere unică. Acest nod nu are șanse să se slăbească și este, fără îndoială, cel mai bun pentru suturi cu fire sintetice.

Lungimea recomandată a capetelor

Lungimea capetelor (10 mm) este proporțională cu coeficientul de frecare și cu flexibilitatea SKD® MONO.



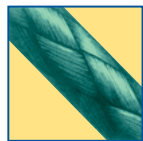

POLY

Sutură chirurgicală sintetică sterilă neresorbabilă, multifilament. Culoare verde.



CE
0546

SKD® POLY este o sutură împletită de poliester pre-stabilizat.

Avansurile în tehnologia de pre-stabilizare a poliesterului împletit au condus la producerea unui fir mai uniform și și mai consistent, cu o creștere pe metru a numărului și densității filamentelor.

Firul este tratat cu colorantul D&C Green nr. 6, în conformitate cu cerințele FDA (SUA) și cu Farmacopeea Europeană Oficială. Sutura este tratată cu silicon.


Cutie cu 12 fire de sutură cu ac, ambalate individual.

ROTUND	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	U.S.P.
			0,5	0,7	1	1,5	2	
1/2 CERC 21,8 mm	60 cm	verde					KPG892	
1/2 CERC 17,4 mm	60 cm	verde				KPG871		

TRIUNGHIULAR REVERS	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	U.S.P.
			0,5	0,7	1	1,5	2	
3/8 CERC 18,7 mm	60 cm	verde					KPG663	
3/8 CERC 16,2 mm	60 cm	verde				KPG651		

TAPERCUTTING	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	U.S.P.
			0,5	0,7	1	1,5	2	
1/2 CERC 17,4 mm	60 cm	verde			KPG953	KPG951		
3/8 CERC 17 mm	60 cm	verde					KPG952	

Tehnica de nod recomandată

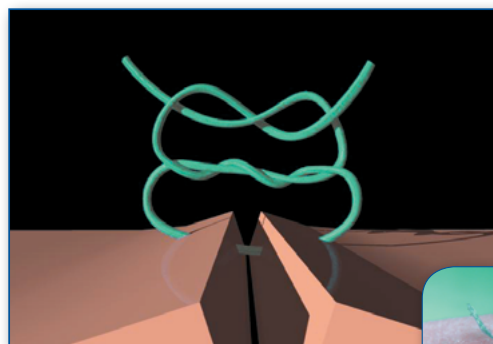



Nodul recomandat: NODUL CHIRURGICAL COMPLET

Se efectuează în modul următor: o trecere inițială cu dublă înfășurare urmată de o trecere unică. Acest nod nu are șanse să se slăbească și este, fără îndoială, cel mai adecvat pentru suturi cu fire sintetice.

Lungimea recomandată a capetelor

Lungimea capetelor (2-3 mm) este proporțională cu coeficientul de frecare și cu flexibilitatea SKD® POLY.

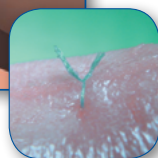

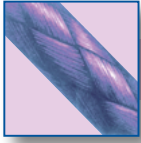

ASSORB

**Sutură chirurgicală sintetică plurifilament, sterilă resorbabilă.
Culoare violet.**

SKD® ASSORB este o sutură resorbabilă sintetică, din filamente împletite de polimer de acid glicolic, oferind pliabilitate, manevrabilitate și rezistență la tracțiune mai mari decât suturile resorbabile monofilament.

A fost adăugat un înveliș pentru a face filamentele împletite mai fine și mai puțin traumatice.

Firul este tratat cu colorantul D&C violet nr. 2 și este conform cu Farmacopeea Europeană pentru suturi sterile resorbabile împletite.

Rezistența la tensiune durează până în a 21-a zi de la implantare.

Absorbția completă este atinsă între 60 și 90 de zile de la implantare.

Cutie cu 6 fire de sutură cu ac, ambalate individual.




CE
1023

ROTUND	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	U.S.P. E.P.
			0,7	1	1,5	2	3	
1/2 CERC 17 mm	60 cm	violet			KAG871/6			

TAPERCUTTING	LUNGIMEA FIRULUI	CULOARE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	U.S.P. E.P.
			0,7	1	1,5	2	3	
1/2 CERC 17,4 mm	60 cm	violet		KAG950/6				
3/8 CERC 13 mm	60 cm	violet		KAG931/6				
3/8 CERC 19 mm	60 cm	violet			KAG971/6	KAG972/6		

Tehnica de nod recomandată

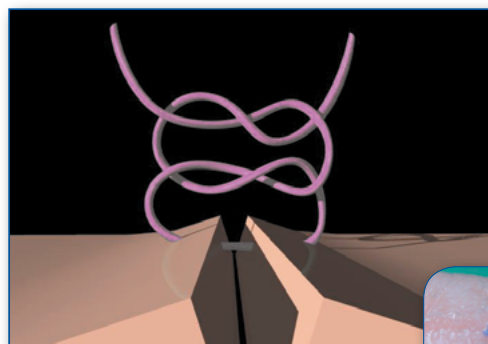

**Nodul recomandat:
PĂTRAT**

Nodul pătrat este realizat din două jumătăți similare de nod, situate pe același nivel.

Se efectuează în modul următor: mai întâi o trecere în sensul acelor de ceasornic, apoi o trecere în sens invers acelor de ceasornic.

Tensiunea aplicată la capetele nodului mărește puterea de strângere a acestuia.

Lungimea recomandată a capetelor

Lungimea capetelor (3 - 4 mm) este proporțională cu coeficientul de frecare și cu flexibilitatea SKD® ASSORB.



Acest material informativ este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.



MIROMED GROUP s.a.

Corso San Gottardo, 54A - 6830 Chiasso - CH
Phone: +41 (0) 91 960 58 48 - Fax: +41 (0) 91 960 58 68
www.miromedgroup.ch - info@miromedgroup.ch



MIROMED-ROM GROUP S.R.L.

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 87, et. 3, sector 1 - 014142 București
Tel/Fax: +40 371 37 99 76 - info@miromed-ro.com - www.miromed-ro.com